

inelco grinders

SERVICE INSTRUKTIONER

DAGLIG KONTROL

- > Løsn vinkelindstillingen og bevæg den frem og tilbage. Rengør bøsningen til elektroden med den medfølgende børste. Se fremgangsmåden i videoen, vha. QR-koden.



SKIFT FILTER

- > Skift filteret på sliberen, når det er fyldt, når du skifter slibeposition, eller når du skifter slibeskive. Se fremgangsmåden i videoen, vha. QR-koden.





SKIFT SLIBESPOR



- > For at skifte slibespor, se fremgangsmåde i manualen eller i videoen, vha. QR-koden.




1. slibespor

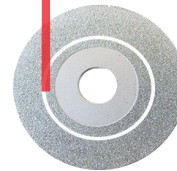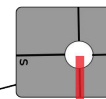

2. slibespor

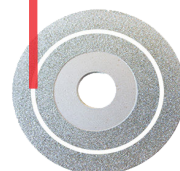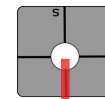

3. slibespor

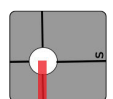

VIGTIG INFORMATION

- > Brug ikke Neutrix sliberen, mens den er placeret i kufferten, pga. fare for overophedning.
- > Efter flere gentagne slibninger kan sliberen overophedes, og der vil være behov for afkølingstid mellem slibningerne.



- > Det anbefales, at den person, der udfører rengøringen, bærer det nødvendige beskyttelsesudstyr.
- > For at undgå transportskader under forsendelse skal Neutrix opbevares i kufferten og emballeres forsvarligt.
- > Hvis det er nødvendigt at skifte slibeskiven, kan du se fremgangsmåden i manualen eller i videoen vha. i QR-koden.
- > Returnér venligst fyldte støvfiltre til forhandleren.

